

ПОРЯДОК НАДЕВАНИЯ КОМБИНЕЗОНА

№	<p>Что нужно сделать (наименование этапов) Как нужно выполнить (ключевой аспект)</p>	<p>Правильный вариант выполнения</p>
1	<p>Обработайте руки спиртосодержащим антисептиком согласно РИ 04.01-2018</p>	
2	 <p>Наденьте перчатки согласно РИ 04.05-2018</p>	
3	<p>Возьмите комбинезон в руки.</p>	
4	<p>Наденьте брюки комбинезона.</p>	

5	<p>Наденьте рукава комбинезона по очереди.</p> <p><i>*Одновременно натягивать оба рукава нельзя – комбинезон может порваться</i></p>	
6	<p>Наденьте бахилы, заправив под них брюки комбинезона, и завяжите завязки бахил.</p>	
7	<p>Возьмите респиратор в ладонь и раскройте до чашеобразной формы.</p>	
8	<p>Возьмите нижнюю резинку и протяните её через голову ниже затылка, одновременно прикладывая нижнюю часть к подбородку, а верхнюю – к переносице.</p>	
9	<p>Протяните верхнюю резинку респиратора через голову и зафиксируйте её на затылке.</p>	
10	<p>Прижмите носовой зажим к носу.</p>	

11	Сделайте вдох и выдох, отрегулируйте положение респиратора и резинок.	
12	Наденьте очки поверх респиратора, проверьте их прилегание.	
13	Наденьте капюшон.	
14	Застегните комбинезон.	
15	Наденьте вторую пару перчаток согласно РИ 04.05-2018 , заправив под них рукава комбинезона.	
16	Убедитесь в том, что элементы защитного комплекта надеты правильно, исключены непокрытые кожные покровы, отсутствуют зазоры между элементами.	

ПОРЯДОК СНЯТИЯ ЗАЩИТНОГО КОМБИНЕЗОНА

1. Комплект снимают в специально выделенном помещении либо там же, где проводились манипуляции, после полного обеззараживания комнаты.
2. В помещении должны быть предусмотрены маркированные емкости для отходов класса В для обеззараживания снятой спецодежды. Для этого емкости заполняют 3% раствором хлорамина или 6% раствором перекиси водорода с 0,5% добавкой ПАВ.
3. Помойте руки в перчатках в 3% растворе хлорамина.
4. Снимите верхние перчатки и положите их в емкость с дезинфицирующим раствором.
5. Снимите бахилы, развязав завязки. Погрузите их в емкость с дезинфицирующим раствором.
6. Обработайте руки.
7. Расстегните молнию на комбинезоне.
8. Снимите капюшон.
9. Снимите рукава комбинезона и сам комбинезон так, чтобы изнаночная сторона оказалась снаружи, а лицевая – внутри.
10. Не расправляя, погрузите комбинезон в емкость с дезинфицирующим раствором.
11. Обработайте руки.
12. Снимите очки.
13. Снимите нижнюю резинку респиратора через голову. Снимите верхнюю резинку с головы и сбросьте респиратор в бак для утилизации медицинских отходов класса В.
14. Снимите вторые перчатки, выворачивая их наизнанку.
15. Примите душ и наденьте чистую одежду.